


# FILTRE VEINE CAVE ALN



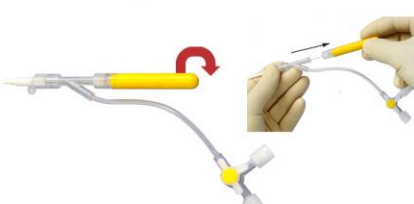
## Retrait du filtre (Voie jugulaire)

- 1**


Introduire l'ensemble **Gaine d'introduction + Dilatateur 9F** jusqu'au dessus du filtre  
Retirer le **Guide en J** et le **Dilatateur**


- 2**


Dévisser et tirer la poignée jaune sur environ 2cm pour faire rentrer la pince à l'intérieur de la **Gaine 7F**  
Introduire le **kit pince** dans la **Gaine d'Introduction 9F**


- 3**


Pousser et visser la poignée jaune pour ouvrir la pince


- 4**


Descendre le **Cathéter Pince** au-dessus de la tête du filtre et s'assurer que celui-ci est positionné en butée sur la tête du filtre


- 5**

Faire glisser la **Gaine d'Introduction 9F** sur les crochets de la pince sur environ 2cm pour recouvrir la tête du filtre  
*Sécuriser en tirant la poignée jaune sur 1cm et en mettant en tension entre pouce&index*  
Continuer à descendre la **Gaine 9F** jusqu'au 1er repère de couleur noire sur la **Gaine 7F**


- 6**


Retirer la **Gaine 7F** jusqu'à visualisation du 2ème repère noir en assurant toujours une tension entre pouce et index afin de pouvoir extraire le filtre hors de la **Gaine 9F** en tirant fermement.  
Cavographie de contrôle à l'aide de la **Gaine 9F**.  
Retirer la **Gaine 9F**  
Hémostase au point de ponction




## Repositionnement du filtre (Voie jugulaire)

- 1**


Introduire l'ensemble **Gaine d'introduction + Dilatateur 9F** jusqu'au dessus du filtre  
Retirer le **Guide en J** et le **Dilatateur**


- 2**


Dévisser et tirer la poignée jaune pour faire rentrer la pince à l'intérieur de la **Gaine 7F**  
Introduire le **kit pince** dans la **Gaine d'Introduction 9F**


- 3**

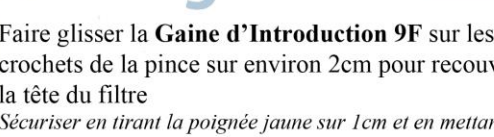
Pousser et visser la poignée jaune pour ouvrir la pince


- 4**

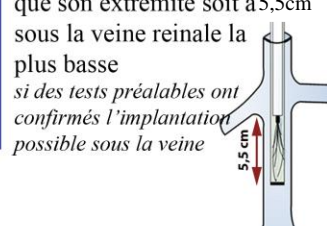
Descendre le **Cathéter Pince** au-dessus de la tête du filtre et s'assurer que celui-ci est positionné en butée sur la tête du filtre


- 5**


Faire glisser la **Gaine d'Introduction 9F** sur les crochets de la pince sur environ 2cm pour recouvrir la tête du filtre  
*Sécuriser en tirant la poignée jaune sur 1cm et en mettant en tension entre pouce&index*  
Continuer à descendre la **Gaine 9F** jusqu'au 1er repère de couleur noire sur la **Gaine 7F**


- 6**

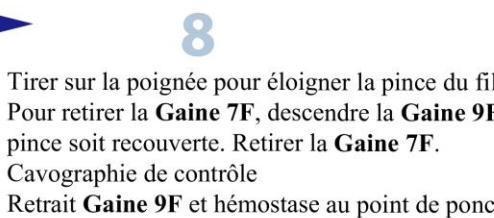
Positionner la **Gaine 9F** pour que son extrémité soit à 5,5cm sous la veine reinale la plus basse  
*si des tests préalables ont confirmés l'implantation possible sous la veine*


- 7**

Faire remonter la **Gaine 9F** sur la **Gaine 7F** jusqu'à ce que la pince soit libérée  
Le filtre est alors ouvert


- 8**

Tirer sur la poignée pour éloigner la pince du filtre  
Pour retirer la **Gaine 7F**, descendre la **Gaine 9F** sur la **Gaine 7F** jusqu'à ce que la pince soit recouverte. Retirer la **Gaine 7F**.  
Cavographie de contrôle  
Retrait **Gaine 9F** et hémostase au point de ponction





0297

Approbation FDA

Procédure d'extraction

Se référer à la notice d'utilisation pour plus d'informations  
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE»  
Juillet 2020